

Instructions for use

CMV RNA ELITE Standard

Calibrador de ADN plasmídico para ensayos cuantitativos



REF STD115ING

UDI 08033891487331

CE **IVD**
0123

HISTORIAL DE CAMBIOS

Rev.	Información del cambio	Fecha (dd/mm/aa)						
03	Ampliación del uso con el ELITE BeGenius Nuevo diseño de los gráficos y del contenido de las instrucciones de uso	29/11/24						
02	<p>Actualización para el cumplimiento de los requisitos del Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios para diagnóstico <i>in vitro</i>.</p> <p style="text-align: center;">NOTA!</p> <p>El código de lote que aparece en la tabla siguiente, y que sigue en el mercado con la etiqueta «Solo uso en investigación» (RUO, por sus siglas en inglés), no se retirará. Este producto puede utilizarse según la fecha de caducidad indicada a continuación. Si tiene este lote, utilícelo según el uso previsto descrito en las instrucciones de uso para productos RUO y solo en asociación con el producto relacionado RTS115ING (también con la etiqueta RUO). Para obtener las instrucciones de uso para productos RUO, póngase en contacto con el personal de ELITechGroup.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>REF. DEL PRODUCTO</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Código de lote</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Fecha de caducidad</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">STD115ING</td> <td style="text-align: center;">U0524-036</td> <td style="text-align: center;">30/04/2026</td> </tr> </tbody> </table> <p>No utilice el nuevo producto STD115ING comercializado conforme al Reglamento europeo sobre productos de diagnóstico <i>in vitro</i> en asociación con el producto relacionado RTS115ING, que sigue en el mercado con la etiqueta RUO.</p> <p>El uso del nuevo producto STD115ING comercializado conforme al Reglamento europeo sobre productos de diagnóstico <i>in vitro</i> requiere el uso de Assay Protocols (protocolos de ensayo) asociados a productos de diagnóstico <i>in vitro</i> con marcado CE. Si desea obtener información adicional, póngase en contacto con el personal de ELITechGroup.</p>	<u>REF. DEL PRODUCTO</u>	<u>Código de lote</u>	<u>Fecha de caducidad</u>	STD115ING	U0524-036	30/04/2026	03/06/24
<u>REF. DEL PRODUCTO</u>	<u>Código de lote</u>	<u>Fecha de caducidad</u>						
STD115ING	U0524-036	30/04/2026						
00-01	Desarrollo de un nuevo producto con los cambios consiguientes	-						

INDICE

1 USO PREVISTO	4
2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	4
3 MATERIAL PROPORCIONADO CON EL PRODUCTO.....	4
4 MATERIAL NECESARIO NO PROPORCIONADO CON EL PRODUCTO	4
5 OTROS PRODUCTOS NECESARIOS	5
6 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.....	5
7 PROCEDIMIENTO	6
8 BIBLIOGRAFÍA	6
9 SÍMBOLOS.....	7
10 NOTA PARA LOS USUARIOS	7

1 USO PREVISTO

El producto **CMV RNA ELITE Standard** es un producto sanitario para diagnóstico *in vitro* concebido para su uso por parte de profesionales sanitarios como calibrador de ADN en cantidad conocida en ensayos de ácidos nucleicos mediante retrotranscriptasa y PCR en tiempo real para la detección y la cuantificación de **ARNm del virión del citomegalovirus humano (ARN de CMV)** junto con el producto **CMV RNA ELITE MGB @Kit** y los instrumentos **ELITE InGenius®** y **ELITE BeGenius®**.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto incluye el calibrador **CMV RNA Q - PCR Standard**, que contiene cuatro niveles de soluciones ADN plasmídico a un título conocido estabilizadas en Tris-HCl o EDTA, cada una de ellas distribuida en **dos probetas listas para el uso**.

El ADN plasmídico contiene la región empalmada del **ARNm del virión UL21.5 de CMV**. La detección y la cuantificación de ARN de CMV utilizando el producto **CMV RNA ELITE MGB Kit** y los instrumentos **ELITE InGenius** y **ELITE BeGenius** permiten calcular la curva de calibración del sistema (lote de producto e instrumento) para la cuantificación de ARN de CMV.

El producto contiene suficientes reactivos para **8 sesiones independientes** en el **ELITE InGenius** y el **ELITE BeGenius**, (4 sesiones en cada probeta), cuando se utilizan 20 µL en cada reacción.

NOTA!

La concentración de ADN plasmídicos en copias/mL se determinó midiendo la absorbencia con un espectrofotómetro. No existen estándares aprobados por la OMS para el ARNm de CMV.

3 MATERIAL PROPORCIONADO CON EL PRODUCTO

Tabla 1

Componentes	Descripción	Cantidad	Clasificación de peligros
CMV RNA Q - PCR Standard 10⁵ ref. STD115ING-5	Solución de ADN plasmídico en una probeta con tapón ROJO	2 × 160 µL	-
CMV RNA Q - PCR Standard 10⁴ ref. STD115ING-4	Solución de ADN plasmídico en una probeta con tapón AZUL	2 × 160 µL	-
CMV RNA Q - PCR Standard 10³ ref. STD115ING-3	Solución de ADN plasmídico en una probeta con tapón VERDE	2 × 160 µL	-
CMV RNA Q - PCR Standard 10² ref. STD115ING-2	Solución de ADN plasmídico en una probeta con tapón AMARILLO	2 × 160 µL	-

4 MATERIAL NECESARIO NO PROPORCIONADO CON EL PRODUCTO

- Campana de flujo laminar.
- Guantes sin talco desechables de nitrilo o de otro material similar.
- Agitador vórtex
- Centrifugadora de sobremesa (aproximadamente 13.000 rpm).
- Micropipetas y puntas estériles con filtro para aerosoles o puntas estériles de desplazamiento positivo (2–20 µL, 5–50 µL, 50–200 µL).
- Agua de calidad para biología molecular.

5 OTROS PRODUCTOS NECESARIOS

Este producto **no incluye** los reactivos para la retrotranscriptasa y la amplificación en tiempo real ni los consumibles.

Para realizar el ensayo, se necesitan los siguientes productos:

Tabla 2

Instrumentos y software	Productos y reactivos
ELITE InGenius (ELITechGroup S.p.A., EG SpA, ref. INT030) ELITE InGenius Software versión 1.3.0.19 (o posterior) CMVRNA ELITE_STD , Assay Protocol (protocolo de ensayo) con parámetros para el análisis de los calibradores	CMV RNA ELITE MGB Kit (EG SpA, ref. RTS115ING) ELITE InGenius PCR Cassette (EG SpA, ref. INT035PCR) ELITE InGenius Waste Box (EG SpA, ref. F2102-000) 300 µL Filter Tips Axygen (Corning Life Sciences Inc., ref. TF-350-L-R-S), solo con ELITE InGenius 1000 µL Filter Tips Tecan (Tecan, Switzerland, ref. 30180118), solo con ELITE BeGenius
ELITE BeGenius (EG SpA, ref. INT040) ELITE BeGenius Software versión 2.2.1 (o posterior) CMVRNA ELITE_Be_STD , Assay Protocol (protocolo de ensayo) con parámetros para el análisis de los calibradores	

6 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este producto está diseñado exclusivamente para uso *in vitro*.

6.1 Advertencias y precauciones generales

- Manipular y eliminar todos los reactivos y materiales utilizados para realizar el ensayo como si fueran infecciosos. Evitar el contacto directo con los reactivos. Evitar salpicaduras o pulverizaciones. Los residuos deben tratarse y eliminarse conforme a las normas de seguridad aplicables. El material desechable combustible debe incinerarse. Los residuos líquidos que contienen ácidos o bases deben neutralizarse antes de eliminarlos.
- Utilizar ropa de protección y guantes adecuados y protegerse los ojos y la cara.
- No pipetear ninguna solución con la boca.
- No comer, beber, fumar ni aplicarse cosméticos en el área de trabajo.
- Lavarse bien las manos después de manipular muestras y reactivos.
- Eliminar los reactivos sobrantes y los residuos conforme a las normas vigentes.
- Leer atentamente todas las instrucciones incluidas antes de realizar el ensayo.
- Durante la realización del ensayo, seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada.
- Utilizar únicamente los reactivos incluidos en el volumen de suministro del producto y los recomendados por el fabricante.
- No utilizar reactivos procedentes de lotes diferentes.
- No utilizar reactivos de otros fabricantes.

6.2 Advertencias y precauciones para los procedimientos de biología molecular

Molecular biology procedures require qualified and trained staff to avoid the risk of erroneous results, especially due to sample nucleic acids degradation or sample contamination by PCR products.

Es necesario disponer de batas, guantes e instrumentos específicos para las sesiones de trabajo.

Los reactivos deben manipularse bajo una campana de flujo laminar. Las pipetas utilizadas para manipular los reactivos deben ser destinadas exclusivamente a dicho propósito. Las pipetas deben ser del tipo de dispensación positiva o ser utilizadas con puntas con filtro para aerosoles. Las puntas utilizadas deben ser estériles y no deben contener desoxirribonucleasas ni ribonucleasas, ni tampoco ADN ni ARN.

Los cartuchos PCR Cassette deben manipularse con cuidado y no deben abrirse nunca para evitar la dispersión del producto de PCR hacia el entorno, así como la contaminación de muestras y reactivos.

6.3 Advertencias y precauciones específicas para los componentes:

Tabla 3

Componente	Temperatura de almacenamiento	Uso a partir de la primera apertura	Ciclos de congelación y descongelación	Estabilidad con carga (ELITE InGenius y ELITE BeGenius)
CMV RNA Q — PCR Standard	-20 °C o menos	un mes	Cuatro como máximo	Hasta cuatro sesiones independientes* de dos horas cada una

* Con congelación intermedia

7 PROCEDIMIENTO

El producto **CMV RNA ELITE Standard** debe utilizarse con la mezcla completa de reacción del producto **CMV RNA ELITE MGB Kit**.

Los componentes **CMV RNA Q - PCR Standard** entregan listos para el uso: el instrumento añade un volumen de **20 µL** directamente a la mezcla completa de reacción (**CMV RNA PCR Mix** y **RT-EnzymeMix**, que son componentes del producto **CMV RNA ELITE MGB Kit**).

Antes de su uso, descongelar la probeta de **CMV RNA Q - PCR Standard** a temperatura ambiente (de +16 °C a +26 °C) durante 30 minutos. Mezclar con cuidado, centrifugar el contenido durante 5 segundos y, después, conservarlo en hielo o en un bloque refrigerado.

El procedimiento de ensayo completo se describe con detalle en las instrucciones de uso del producto **CMV RNA ELITE MGB Kit**.

Las características de rendimiento y las limitaciones del procedimiento del ensayo completo se describen con detalle en las instrucciones de uso del producto **CMV RNA ELITE MGB Kit**.

NOTA!

Los instrumentos ELITE InGenius y ELITE BeGenius guardan los resultados del producto **CMV RNA Q - PCR Standard** y los utilizan para calcular la curva de calibración. La curva de calibración se necesita para cada lote de producto **CMV RNA ELITE MGB Kit**. Los resultados guardados de la amplificación del calibrador Q - PCR Standard caducan **a los 60 días**.

8 BIBLIOGRAFÍA

W. D. Rawlinson *et al.* (1993) *J. Virology* **67**: 5502–5513

D. Wang *et al.* (2004) *PNAS* **101**: 16642–16647

W. A. Bresnahan (2000) *Science* **288**: 2373–2376

A. E. Greijer *et al.* (2000) *J. Virology* **74**: 9078–9082

E. Terhune *et al.* (2004) *J. Virology* **78**: 10390–10398

E. Sarcinella *et al.* (2004) *Virus Research* **104**: 129–137

- E. A. Lukhtanov *et al.* (2007) *Nucleic Acids Res.* 35 : e30
- G. Gerna *et al.* (2019) *Expert Opinion on Pharmacotherapy* 20: 1429–1438
- I. Cassaniti *et al.* (2021) *Am. J. Transplantat.* 21: 1622–1628
- C. N. Kotton *et al.* (2018) *Transplantation* 02: 900–931
- K. Linnet *et al.* (2004) *Clin. Chem.* 50: 732-740.
- G. Piccirilli *et al.* (2024) *J. Clinical Microbiology* 62(5): e0163023.

9 SÍMBOLOS



Número de catálogo.



Límite superior de temperatura.



Código de lote.



Fecha de caducidad (último día del mes).



Producto sanitario para diagnóstico *in vitro*.



Cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios para diagnóstico *in vitro*. Certificación emitida por la TÜV SÜD Product Service GmbH, Alemania.



Identificador único del producto



Contenido suficiente para <<N>> análisis.



Consultar las instrucciones de uso



Contenido.



Fabricante.

10 NOTA PARA LOS USUARIOS

Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto deberá comunicarse al fabricante y a las autoridades competentes del Estado miembro en el que resida el usuario o el paciente. En el momento de la revisión actual de las instrucciones de uso, no se había producido ningún incidente grave ni ninguna retirada relacionada con el rendimiento del producto o la seguridad del dispositivo.

No obstante, cuando este sistema informático se encuentre en funcionamiento, se proporcionará un «Resumen de seguridad y rendimiento» a través de la base de datos europea sobre productos sanitarios (Eudamed). Antes de que se publique la declaración de plena funcionalidad de Eudamed, el «Resumen de seguridad y rendimiento» se pondrá a disposición del público sin retrasos indebidos cuando se solicite escribiendo un correo electrónico a la dirección emd.support@elitechgroup.com.

El logotipo de ELITe MGB® logo, ELITe InGenius® y ELITe BeGenius® son marcas registradas de ELITechGroup en la Unión Europea.

ELITechGroup S.p.A.
C.so Svizzera, 185, 10149 Turín, Italia
Teléfono: +39-011 976 191

Fax: +39-011 936 76 11

Correo electrónico: emd.support@elitechgroup.com

Página web: www.elitechgroup.com

